



Weitere Produkte für Vierbeiner sowie Ersatz-Hafttape, Haftklebestreifen und den Remover finden Sie auf unserer Website. Gerne beraten wir Sie.



DILECTUS KG
 Carl-Zeiss-Str. 42
 47445 Moers
 Tel. +49 2841 999 96 81
 info@dilectus.de
 www.dilectus.de



DILECTUS
 ORTHOPÄDIETECHNIK
 für Vierbeiner

Rutenschutz-3D
A n w e n d u n g





Lieferumfang

- 1x Rutenschutz
- 2x Hafttape grau
- 10x Haftklebestreifen
- 1x Remover Spray

Anwendung

1. Einen Haftklebestreifen auf die Innenseite des Rutenschutzes kleben. Die Haftklebestreifen sind stark haftend und dienen zur Fixierung des Rutenschutzes an der Rute und verhindern das abrutschen. Wenn die Klebekraft nachlässt, den Haftklebestreifen austauschen. Die Haftklebestreifen und das Hafttape können einzeln nachbestellt werden.

2. Das Hafttape an dem Rutenschutz fixieren (Position 2). Dazu das Tape an einer Ecke umklappen, durch die Lasche fädeln, am Tape ankleben und ca. 5-8 cm zur Fixierung um die Rute wickeln.

3. Mit einer Drehbewegung den Rutenschutz auf die Rute schieben. Der Rutenschutz ist richtig angelegt, wenn das Fell der Rutenspitze leicht herauschaut und die lange Seite des Rutenschutzes an der Unterseite der Rute positioniert ist. Die Rute dann am oberen Teil am Haftklebestreifen leicht andrücken.

4. Den Rutenschutz leicht zusammendrücken und mit dem Hafttape an Position 1 umwickeln. Somit ist der Rutenschutz im Umfang fixiert und liegt eng an der Rute an.

Hinweis

Der Rutenschutz muss Kontakt zur Rute haben. Ist der Rutenschutz zu groß entsteht ein Hohlraum, der Rutenschutz verliert seine Stabilität und kann brechen. Sollte Ihr Rutenschutz zu groß sein, tauschen Sie diesen unbedingt gegen einen kleineren aus.

Kontrollieren Sie während der Anwendung des Rutenschutzes regelmäßig die Rute auf Druckstellen, Schwellungen oder Verletzungen.

Entfernen



Das Tape an Position 1 und 2 entfernen. Mittels Remover-Spray den Haftklebestreifen auf der Innenseite lösen. Achtung: sprühen Sie den Remover nicht auf offene Wunden.



Ein Video zur Anwendung und Datenblätter finden Sie auf unserer Website: www.dilectus.de/rutenschutz

Es gelten unsere DSGVO und AGB