

# Expander V-03,

Sicherheitshinweis und Anwendung




Eine optimale Länge des Expanderseiles kann nicht als Standard angegeben werden und hängt von der Beeinträchtigung des Gangbildes ab.

- befestigen Sie den Adaption-Clip seitlich am Geschirr
- haken Sie das Expanderseil am Geschirr und am Schuh ein
- positionieren Sie Ihren Hund mit den Hinterläufen in eine neutrale Pfotenstellung
- stellen Sie die Länge des Expanderseiles jetzt so ein, dass eine leichte Spannung vorhanden ist und beim laufen die Pfote unterstützend nach vorne geführt wird

Nach einigen Tagen Lauftraining, kann es erforderlich sein die Länge des Expanderseiles anzupassen. Bei Fragen zur Anwendung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Wir empfehlen Ihnen für die Anwendung mit einer Tierphysiotherapie-Praxis Kontakt aufzunehmen.

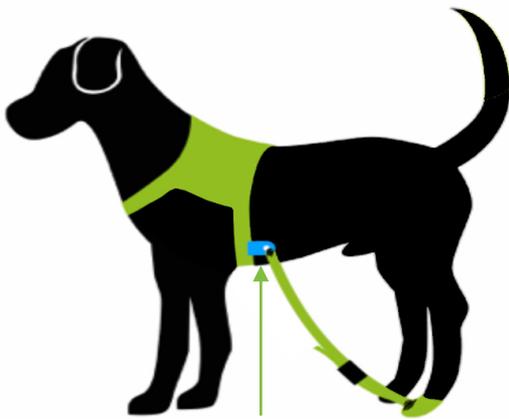

Adaption des Expanders am Geschirr:

- den DILECTUS Clip (welcher aus 2 Teilen besteht), können Sie an einer beliebigen Stelle am Geschirr anbringen und die Zugrichtung erproben. Soweit wie möglich vorne ist oft eine gute Position. Der Clip kann auch am Gurtband befestigt werden.

Wie Sie den Clip anbringen, können Sie sich auf unserer Webseite in einem Video unter <https://www.dilectus.de/hunde-expander> ansehen.

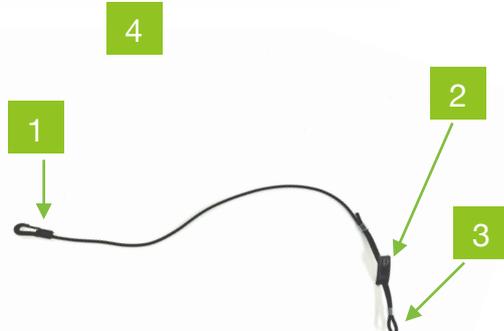

- 1 : Karabiner zum Einhängen/ Adaptieren am Geschirr
- 2 : DILECTUS Längenverstellung
- 3 : Öse zum Einhängen am Schuhkarabiner
- 4 : Adaption-Clip

**Lassen Sie Ihren Hund nie allein mit dem Expander laufen und unterstützen Sie ihn beim Aufstehen, wenn der Expander im Liegen angelegt wird. Je nach Beeinträchtigung kann beim Aufstehen und Laufen ein Verheddern der Expander erfolgen, was zu Verletzungen führen kann. Wir empfehlen ein Lauftraining bei einer Tierphysiotherapie.**

